

Eine Einbettkassette - viele Möglichkeiten


Sie haben die Wahl!

In pathologischen/histologischen Laboren ist die Arbeitsweise vielfältig und je nach Laborgröße stehen unterschiedliche Bedürfnisse im Vordergrund.

Als zuverlässiger Partner stellt die KABE-Labortechnik GmbH ihr umfangreiches Portfolio in diesem Bereich immer wieder auf den Prüfstand und passt es den gegebenen Veränderungen an, um möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden und die Kunden zufriedenzustellen.

Die optimierte Einbettkassette bietet die Möglichkeit, sie mit zwei Deckelvarianten zu kombinieren; der bereits bekannte Deckel wird weiterhin am Steg an der Rückseite der Kassette angeklipst, wohingegen der neue Deckel an der Vorderseite eingesteckt und nach hinten geklappt und verschlossen wird.

■ ■ ■ ■ ► **Besonderheit: Die Einbettkassetten sind mit geschlossenem Deckel am Band aufgefädelt.**

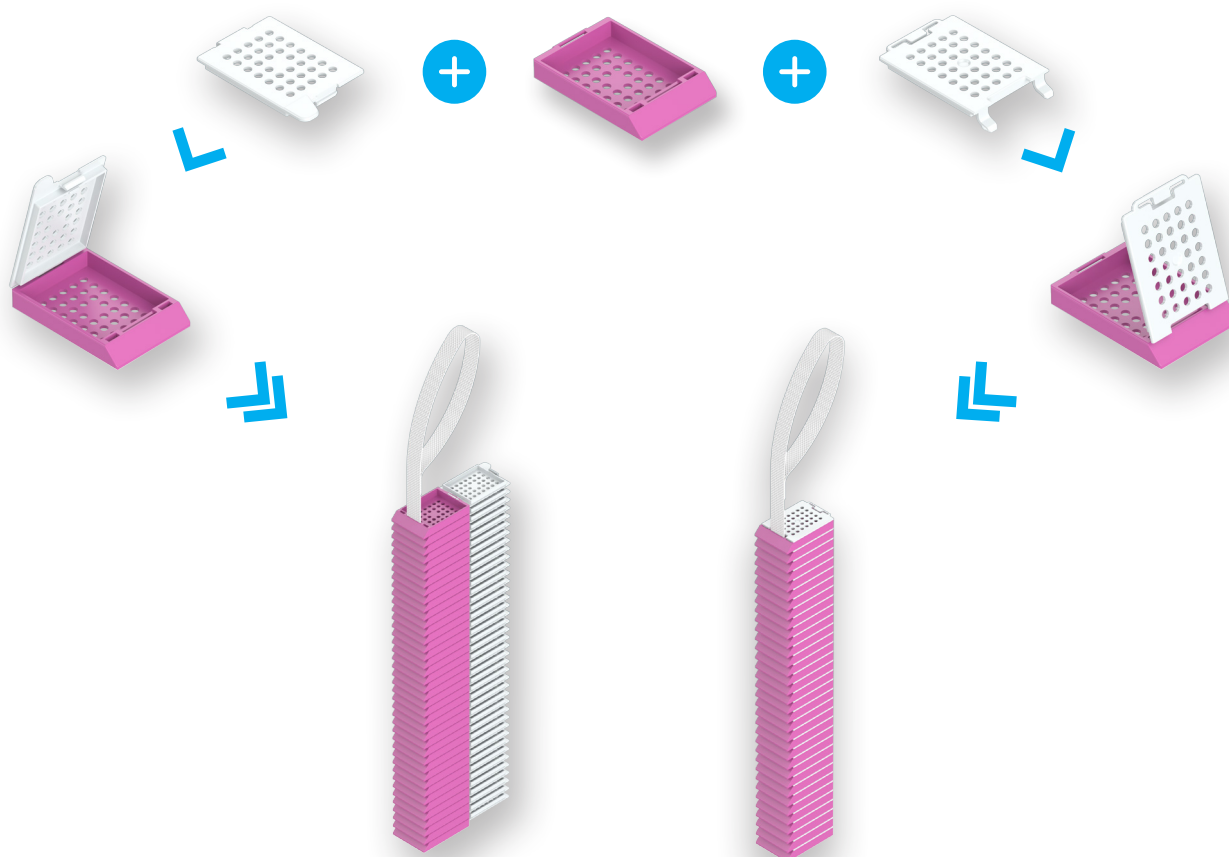


- » **Bewährte Verarbeitung:** Als gestapelte Variante am Band erhältlich, ist sie für gängige Drucker (z.B. Leica, Primera) geeignet
- » **Einfaches Schließen und Öffnen:** Der Deckel lässt sich fast 180° öffnen – ideal für ein optimales Einlegen der Probe

- » **Erweiterte Druckmöglichkeiten:** Dank der patentierten Stapelung im geschlossenen Zustand können auch Laserdrucker (z. B. Dakewe) problemlos bedient werden
- » **Vereinfachte manuelle Handhabung:** Sollte eine manuelle Deckelanbringung gewünscht sein, ermöglicht das Design ein intuitives und einfaches Einstecken

Gebrauchshinweis für die Einbettkassette mit Steckdeckel



Um das Öffnen des Deckels zu vereinfachen, wurde ein Federmechanismus integriert:
Die Lasche (s. Pfeil) mit dem Daumen nach innen drücken. Nun lässt sich der Deckel leicht öffnen.

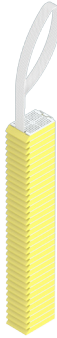								
	Einbett- kassetten Standard	Lasereinbett- kassetten Standard	Einbett- kassetten Universal	Lasereinbett- kassetten Universal	Einbett- kassetten Biopsie	Lasereinbett- kassetten Biopsie	Einbett- kassetten Bionet	Lasereinbett- kassetten Bionet
mit geschlossenem Deckel am Band								
weiß	054200	054300	054220	054320	054240	054340	054260	054360
hellblau	054201	054301	054221	054321	054241	054341	054261	054361
gelb	054202	054302	054222	054322	054242	054342	054262	054362
rosa	054203	054303	054223	054323	054243	054343	054263	054363
hellgrün	054204	054304	054224	054324	054244	054344	054264	054364
hellorange	054205	054305	054225	054325	054245	054345	054265	054365
rot	054207	-	054227	-	054247	-	054267	-
hellrot	-	054307	-	054327	-	054347	-	054367
grau	054208	-	054228	-	054248	-	054268	-
hellgrau	-	054308	-	054328	-	054348	-	054368
beige	054209	-	054229	-	054249	-	054269	-
hellviolett	054210	-	054230	-	054250	-	054270	-
türkis	054211	054311	054231	054331	054251	054351	054271	054371
dunkelrosa	-	054317	-	054337	-	054357	-	054377
dunkelorange	054212	-	054232	-	054252	-	054272	-
pastellgelb	054214	-	054234	-	054254	-	054274	-
pastellblau	054215	-	054235	-	054255	-	054275	-
pastellgrün	054216	-	054236	-	054256	-	054276	-

VE: 1.020 Stück im Spenderkarton (30 x 34 Stück), 3.060 Stück im Karton



One embedding cassette – many possibilities

The choice is yours!


In pathological/histological laboratories, workflows are diverse, and depending on the size of the lab, different requirements take priority.

As a reliable partner, KABE-Labortechnik GmbH continuously reviews its extensive product portfolio in this area and adapts it to ongoing changes in order to meet as many requirements as possible and ensure customer satisfaction.


The optimized embedding cassette offers the option of combining it with two lid variants:

The already established lid continues to be clipped onto the bar on the back of the cassette, whereas the new lid is inserted at the front, then flipped back and closed.

■■■▶ **Special feature: The embedding cassettes are mounted onto a strip with the lid closed.**

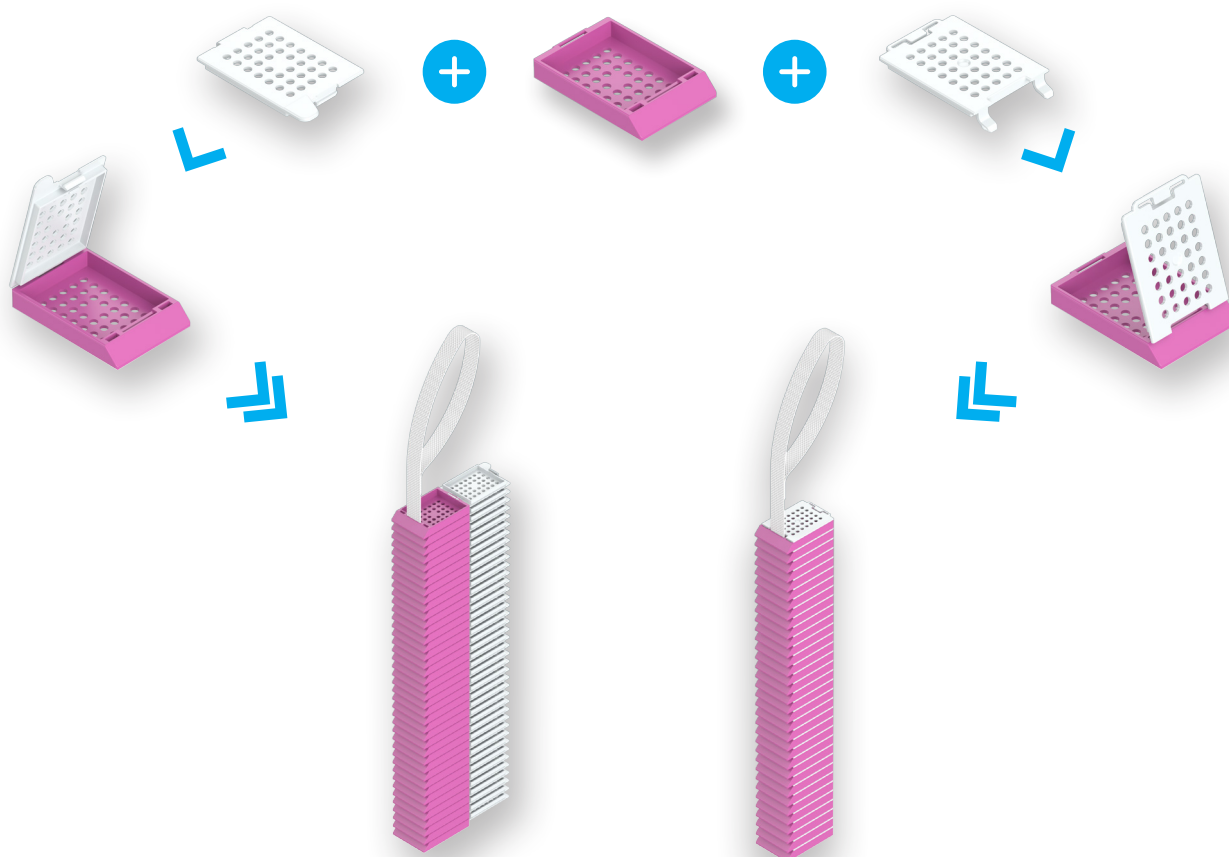

- » **Proven processing:** Available as a stacked version on a strip, suitable for common printers (e.g., Leica, Primera)
- » **Easy closing and opening:** The lid can be opened to almost 180° – ideal for optimal sample embedding

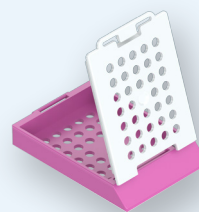

- » **Extended printing options:** Thanks to the patented stacking when closed, laser printers (e.g., Dakewe) can also be used without issues
- » **Simplified manual handling:** If manual lid attachment is desired, the design allows for intuitive and simple insertion

Information for use - embedding cassette with plug-in lid



To simplify opening the lid, a spring mechanism has been integrated:
Press the tab (see arrow) inward with your thumb. The lid can then be opened easily.

	Embedding cassettes Standard	Laser embedding cassettes Standard	Embedding cassettes Universal	Laser embedding cassettes Universal	Embedding cassettes Biopsy	Laser embedding cassettes Biopsy	Embedding cassettes Bionet	Laser embedding cassettes Bionet
with plug-in lid on a tape								
white	054200	054300	054220	054320	054240	054340	054260	054360
light blue	054201	054301	054221	054321	054241	054341	054261	054361
yellow	054202	054302	054222	054322	054242	054342	054262	054362
pink	054203	054303	054223	054323	054243	054343	054263	054363
light green	054204	054304	054224	054324	054244	054344	054264	054364
light orange	054205	054305	054225	054325	054245	054345	054265	054365
red	054207	-	054227	-	054247	-	054267	-
light red	-	054307	-	054327	-	054347	-	054367
grey	054208	-	054228	-	054248	-	054268	-
light grey	-	054308	-	054328	-	054348	-	054368
beige	054209	-	054229	-	054249	-	054269	-
light violet	054210	-	054230	-	054250	-	054270	-
turquoise	054211	054311	054231	054331	054251	054351	054271	054371
dusky pink	-	054317	-	054337	-	054357	-	054377
dark orange	054212	-	054232	-	054252	-	054272	-
pastel yellow	054214	-	054234	-	054254	-	054274	-
pastel blue	054215	-	054235	-	054255	-	054275	-
pastel green	054216	-	054236	-	054256	-	054276	-

Packaging unit: 1,020 pieces per dispenser box (30 × 34 pieces), 3,060 pieces per box

