


Präparierte Probenröhren zur Milchkonservierung und zur Durchführung des Milchträchtigkeitstests IDEXX

Die Probenröhren zur Milchkonservierung sind mit verschiedenen Konservierungsmitteln gemäß §64 LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) präpariert. Diese Konservierungsmittel gewährleisten eine Lagerung der Milchprobe von 6 Stunden bei Raumtemperatur und eine anschließende Aufbewahrung von bis zu 18 Stunden bei 2 - 4°C. Untersuchungen bis zu 24 Stunden nach der Probennahme liefern so korrekte Ergebnisse.

- Der Farbzusatz dient ausschließlich der Kennzeichnung als präparierte Milchprobe.
- Der Versandkarton mit Gittereinsatz (optional erhältlich) ermöglicht einen sauberen und sicheren Transport.

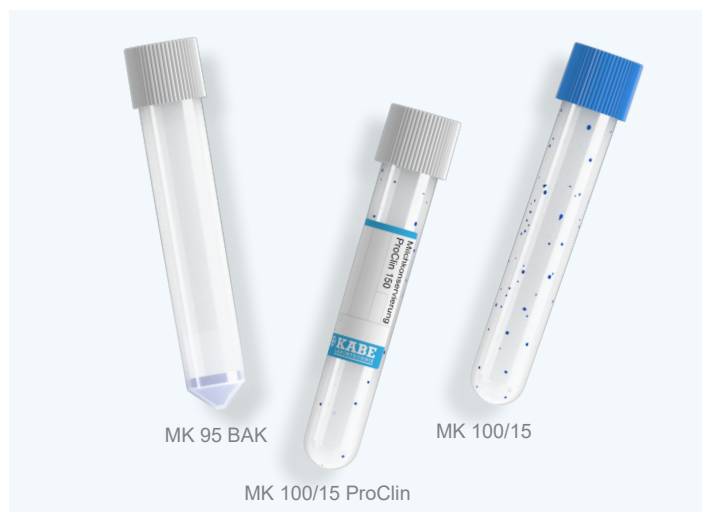

Optional: Stopfen mit durchstechbarer Gummimembran!

Der Stopfen mit elastisch rückformender Gummimembran ermöglicht die Probenentnahme mit einem Pipettier-Roboter aus der geschlossenen Milchprobenröhre:

- Vereinfachung der Probenvorbereitung: das Entstopfen entfällt!
- Kein Auslaufen oder Verdunsten der Probe.
- Keine Kontamination der Probe, da geschlossenes System. Probenrückstände an der Probennehmernadel werden beim Durchgang durch die Gummimembran abgestreift.
- Kein Recapping erforderlich.

Auf Ihre Wünsche zugeschnitten:

Auf Wunsch können farblich unterschiedliche Stopfen oder eine entsprechende Etikettierung eine eindeutigere Zuordnung gewährleisten.

Nachweis der Trächtigkeit aus Milchproben mit dem IDEXX Milchträchtigkeitstest.

Alle Präparierungen der Milchkonservierungsröhre von KABE-Labortechnik GmbH sind vom Hersteller getestet und für den IDEXX Milchträchtigkeitstest geeignet.

Tierhalter können auf diese Weise nicht trächtige Kühe ermitteln und dementsprechend eine Nachbesamung veranlassen.

Der Test bietet ein hohes Maß an Sensitivität und Spezifität ab 28 Tagen nach der Besamung.*

Keine Blutuntersuchung erforderlich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Volumen
042200	MK 100/15 PPn blau ohne Etikett	10 ml
*1	MK 100/15 PP G blau mit durchstechbarem Stopfen und Barcode-Etikett	10 ml
042241	MK 100/15 PPn ProClin 150 weiß	10 ml
042220	MK 95 BAK PP Sn weiß ohne Etikett	12 ml

* Angaben des Herstellers: www.idexx.de

*1 Artikelnummer wird kundespezifisch vergeben.

